

Příručka k používání ručního nízko-otáčkového dentálního nástroje

Contra-Angle Dr. Mayer

Premium Led F1, F11, F11 20:1, F11 1:5, F117 1:1 Fo, F22 1:5 Fo

Samo sterilizační až do 135°C

Před použitím výrobku Vás žádáme, abyste si pozorně přečetli Příručku pro uživatele a abyste přísně dodržovali operační postupy a abyste se rovněž ujistili, že výrobek je udržován správně.

Použití: Dentální rotační nástroje určené pro zachovnou stomatologii a profylaxi. Určeno k odstranění materiálu zubního kazu, preparace kavít a korunek, odstranění výplní, zpracování zubních a obnovených povrchů.

1. HLAVNÍ KOMPONENTY

Použitelná fréza průměr 2.35



Klip frézy

2. PRACOVNÍ PARAMETRY

v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 245KPa (2.5kgf / cm²), rychlost vzduchového motoru je 18000min⁻¹ (ot.min.), spotřebované množství vzduchu je 42NL/min
v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 294KPa (3.0kgf/cm²), rychlost vzduchového motoru je 20000min⁻¹ (ot.min.), množství spotřebovaného vzduchu je 51NL/min
v případě, kdy je napájecí tlak vzduchu 392KPa (4.0kgf / cm²), rychlost vzduchového motoru je 22000min⁻¹ (ot.min.), množství spotřebovaného vzduchu je 72NL/min

3. ZMĚNA POZITIVNÍ-NEGATIVNÍ

Positivní: vyměnitelný kroužek pro pozitivní a negativní směr se otáčí do strany [F] (Obrázek 1),
Negativní: vyměnitelný kroužek pro pozitivní a negativní směr se otáčí do strany [R] (Obrázek 2)



Obrázek 1

Obrázek 2

Obrázek 3

4. NAPÁJENÍ VODOU


Když ruční nástroj potřebuje vodu, musíte napojit tenkou trubici na rozhraní vodního zdroje vzduchového motoru, druhý konec je napojen na rozhraní vody CA nebo SH. V případě, že tenká trubice je dostatečně dlouhá, zkrátte ji na délku vhodnou pro efektivní používání.* (Obrázek 4)



Obrázek 4

5. ZPŮSOBY VKLÁDÁNÍ A VYJÍMÁNÍ

(1) Právý nástroj: při vyjímání frézy je nutné kroutit—> až do doby, kdy uslyšíte zvuk. A při vkládání frézy, kroutíte —> na opačnou stranu. V okamžiku, kdy uslyšíte zvuk, fréza je upevněna. (Obrázek 5)
(2) Nástroj proti úhlový: zašroubujte příchytku a vložte dolní část frézy na střed osy, poté pootočte úchytku na původní místo. Při demontování frézy odšroubujte úchytku a vyjměte frézu

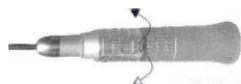

Obrázek 5

6. ČISTĚNÍ A PROMAZÁVÁNÍ

(1) Vzduchový motor: vložte trubici motoru. Například, nakapejte mazivo do vzduchové trubice, do dolní části. Promazávejte po každém použití, kapejte 2 kapky (Obrázek 6)
(2) Právý ruční nástroj: pootočte rozprašovací hlavu směrem k mazacímu otvoru. Při demontáži frézy přiblížte rozprašovací hlavu k ručnímu nástroji a ujistěte se, že jsou patrné stopy oleje na hlavě ručního nástroje (alespoň 2 vteřiny). V okamžiku promazávání nezaměňujte nádobku s olejem.
(3) Nástroj proti úhlový: uvolníme šroubovací část SH, vyjme se vodící komponent. Promažte vodivou část. Při promazávání hlavy nástroje odšroubujte příchytku. Promažte po údržbě nebo dezinfekci, průsak oleje je totožný jako u CA.



Obrázek 6

7. SAMOSTERILIZACE

Po údržbě dezinfikujte následovně: Odstraňte špinu z povrchu za pomoci kartáče. Po vyčištění nakapejte olej, poté vložte do antibakteriálního sáčku s etiketou, dezinfikujte při maximální teplotě 135°C, například, 121°C po dobu 20min, 132°C po dobu 15min.

8. ZPŮSOBY VÝMĚNY KONCOVKY

1. Uvolněte příchytku šroubovací části a vyjměte napojovací komponent.
2. Vyjměte kryt za pomoci klíče. Příklad (Obrázek 7).
3. Vyjměte koncovku s frézami. Vyčistěte hlavu olejem.
4. Vložte zvýšenou část nové koncovky do žlábků ručního nástroje a poté zatlačte.



Obrázek 8



Obrázek 7

Nepoužívejte poškozené nebo ohnuté frézy, může dojít k úrazům. V případě, že část se žlábkem je poškozená, frézy se vyjímají velmi těžko.

Udržujte fixační část čistou, je-li špinavá, koncovka se zasekne nebo fixační část ztratí svou sílu. Utáhněte správně frézy, abyste předešli poškození ložisek již v počátečním stádiu. Nepoužívejte motor, když je příchytky volná nebo bez fréz. Instalujte frézy nebo stick standardním způsobem, ačkoli se nepoužívá.

Výrobce: Guangdong JINME Medical Technology Co., Ltd.
A15,Guangdong New Light Source Industrial Base,Luocun Langsh
Shishan Town, Nanhai District,528226 Foshan,Guangdong,
PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

EC REP

Shanghai International Holding Corp.GmbH
(Europe) Efirestrasse 80, 20537, Hamburg
Germany
Tel. 0049-40-251317, Fax: 0049-40-255726
Distributor: DENTSTORE SRL
Ul. Tepeș Voda, č. 89, Sector 2, Bukurešť, Rumunsko

CE
0123

Datum vydání: 27. 10. 2021