

Dr. Mayer Energy - Ubrousky s alkoholem k rychlému omývání a dezinfekci povrchů lékařského vybavení.

Použití: Ubrousky s alkoholem jsou určeny k rychlému omývání a dezinfekci malých povrchů lékařského vybavení a předmětů, které přicházejí do kontaktu s potravinami. Rovněž se doporučují k dezinfekci stomatologického příslušenství před zahájením procesu sterilizace.

Způsob použití: Ubrousek vyjměte z obalu a utřete s ním příslušný povrch. Opatrně otevřete víko krabice. Po otevření obalu může být výrobek použitován po dobu 21 dní. Nepoužívejte, je-li ubrousek suchý. Nepoužívejte na povrchy citlivé na účinek alkoholu (například akrylové sklo). Výrobek je určen k použití profesionálním uživatelem.

Účinnost: Bakterie (včetně MRSA) v souladu s: EN 1276: 30 s*, 1 min, EN 13727: 30 s*, EN 13697: 30 s*, 1 min, EN 16615: 30*s, 1 min **Fungi** (C. albicans) v souladu s: EN 1650: 30 s*, 1 min, EN 13624: 30 s*, EN 16615: 30*s, 1 min **Bacily tuberkulózy** (M. terrae) v souladu s: EN 14348: 30 s*, 1 min **Viry** (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, virus chřipky, Herpes simplex, Ebola) v souladu s: DVV/RKI: 30 s **Virus Rota** v souladu s: EN 14476: 30 s* **Adenoviry** v souladu s: EN 14476: 1 min* (*Podmínky pro čistotu).

Složení: 100 kusů obsahuje 173 g impregnačního přípravku, 100 g obsahuje: 40 g – propan-2-ol (CAS:67-63-0), 20 g – etanol, 0,39 g – amine, n-C10-16-di výrobky trimethylen-alchil s reakcí s kyseliny chloroctové, 0,25 g – didecyldimethylamoniumchlorid.

Látky, které přispívají ke klasifikaci: propan-2-ol.

Věty o nebezpečnosti: H412 – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. H319 – Způsobuje vážné podráždění očí. H226 – Hořlavá kapalina a páry. H336 – Může způsobit ospalost nebo závrať.

Věty o bezpečném zacházení: P210: Chráňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. P280: Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. P304+P340: V PŘÍPADĚ VDECHNUTÍ: vynesete postiženého na volný vzduch a ponechte jej v klidu v poloze pohodlné pro dýchání. P305+P351+P338: V PŘÍPADĚ ZASAŽENÍ OČÍ: Vyplachujte pečlivě vodou po dobu několika minut. Eventuálně vyjměte kontaktní čočky, pokud to je možné bez většího potíží. Pokračujte ve vyplachování. P403+P233: Skladujte v dobře větraném prostoru. Nádoba musí být těsně uzavřena. P501: Vyhoďte obsah/nádobu v souladu s předpisy pro nebezpečný odpad, obaly či odpadní obaly.

Opatření k poskytnutí první pomoci: Vdechnutí: Vynesete postiženou osobu z nebezpečné oblasti, dopravte ji na čerstvý vzduch a udržte ji v klidu. V závažných případech zástavy srdce aplikujte techniky umělého dýchání (z úst do úst, masáž srdce, podávání kyslíku atd.) a zajistěte okamžitou lékařskou pomoc.

Zasažení kůže: v případě zasažení kůže, odstraňte kontaminovaný oděv a obuv, oplachujte nebo sprchuje postiženého dostatečným množstvím čisté vody a neutrálního mýdla. V případě závažných postižení se poraďte s lékařem.

Zasažení očí: Vyplachujte oči dostatečným množstvím vody při pokojové teplotě alespoň 15 minut. Nedovolte postiženému, aby si oči mnul nebo aby je zavířel. Používá-li zraněný kontaktní čočky, je nutné je odstranit, pokud se nepřilepily na oči, protože mohou způsobit další zranění. Ve všech zmíněných případech je nutné po opláchnutí okamžitě dopravit zraněného k lékaři a předložit bezpečnostní list výrobku.

Požiti/vdechnutí: Poskytněte okamžitě lékařskou pomoc a ukažte lékaři bezpečnostní list výrobku. Nevyloučte zvracení, dojde-li k němu, držte hlavu postiženého zakloněnou dopředu, abyste předešli požití. Udržte postiženého v klidu. Vyplachujte ústa a krk, neboť je možné, že byly tyto části požitím výrobku zasaženy.

Nebezpečné účinky na zdraví: Zasažení očí: Kontakt s tímto výrobkem způsobuje poranění očí. Bezpečnostní list je k dispozici na vyžádání. Podrobné informace o poskytnutí první pomoci naleznete v bezpečnostním listu výrobku. Obsahuje: < 5 % kationových tenzidů, < 5 % amfoterických tenzidů, sloučeninu parfému (LIMONENE). Bezpečnostní list materiálů je k dispozici na www.medisept.pl. Tensioaktivní činitele splňují požadavky na biologické rozložení v souladu s nařízením 648/2004.



LOT



Podívejte se na potisk na obalu



CE 2274
Datum vydání: říjen 2021

RO rev.5



Pozor



Výrobce: MEDISEPT Sp. z o.o. Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polsko, tel. +48 81 535 22 22
www.medisept.pl

Distributor: Dentstore, ul. Tepeš Vodá č. 89,
Bukurešť, Městská část 2, tel. 021 308 57 51
www.dentstore.ro