

## Dr. Mayer Green Tonic

### Sprej pro čištění a dezinfekci povrchů

Kapalina pro rychlou dezinfekci malých prostor v lékařském průmyslu, v domech s pečovatelskou službou, ozdravovných, posilovných, lázních, kadeřnických, masážních a kosmetických salonech, ve školkách a školách.

#### Vlastnosti výrobku:

Pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků, jako jsou zdravotnická křesla, lékařské a rehabilitační vybavení. Navrženo pro veškeré nelékařské pracovní plochy, stoly, klíky, madla a také pro kadeřnické a kosmetické vybavení a příslušenství. Aktivní již za 15 sekund proti plísni a za 30 sekund proti bakteriím, tuberkulóze a virům (včetně Rota, Noro). Nezanechává šmouhy ani skvrny. Doporučeno zejména pro skleněné a lesklé povrchy. Vůně čajového tonika.

#### Výhody pro uživatele:

arantovaná účinnost a bezpečnost použití.  
Výrazně snižuje riziko infekce.  
Rychlý účinek čistého a dezinfikovaného povrchu.  
Lze použít na mnoho materiálů.

#### Použití:

Kapalina pro rychlou dezinfekci malých prostor v lékařském průmyslu, v domech s pečovatelskou službou, ozdravovných, posilovných, lázních, kadeřnických, masážních a kosmetických salonech, ve školkách a školách. Vhodné pro dezinfekci povrchů, jako jsou pracovní plochy, stoly, klíky, madla, a také pro kadeřnické a kosmetické vybavení a příslušenství, pro neinvazivní zdravotnické prostředky, jako jsou zdravotnická křesla, lékařské a rehabilitační vybavení. **Doporučuje se také pro dezinfekci dentálních násadů před jejich sterilizací a pro lžice na zubní otisky a silikonové zubní otisky.** Výrobek účinkuje proti bakteriím, kvasinám, tuberkulóze a omezeně proti virům (proti Rota a Noro virům) a také proti obaleným virům (včetně Vaccinia, HIV, HBV, HCV).

#### Návod k použití:

Postříkejte povrch ze vzdálenosti asi 30 cm a ujistěte se, že je zcela pokrytý. Vyčkejte 30 sekund. Výrobek nevyžaduje omytí vodou.

**Složky:** aktivní látka ve 100 g výrobku: 63,7 g ethanol, 6,3 g propan-2-ol

#### Balení:

5l kanystř

Zdravotnický prostředek třídy II dle zákona o zdravotnických prostředcích. Určen pro dezinfekci neinvazivních zdravotnických prostředků.

Číslo povolení pro biocidní přípravky v Polsku: 7675/19

Bezpečnostní list a list s údaji o komponentách je dostupný na [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

MEDISEPT Sp. z o.o.

Konopnica 159 c

21-030 Motycz

telefon: + 48 81 535 22 22

export@medisept.pl [www.medisept.pl](http://www.medisept.pl)

Dovazce: DENTSTORE SRL,

Tepes Voda Street

č. 89 Bukurešť, RUMUNSKO

	Účinnost	Podmínky znečištění	
		EN 14885	cisto
Bakterie (včetně MRSA)	EN 13727	30 sek.	30 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
Plísně ( <i>C. albicans</i> )	EN 13624	15 sek.	15 sek.
	EN 16615	30 sek.	30 sek.
<i>Mycobacteria tuberculosis</i> ( <i>M. terrae</i> )	EN 14348	30 sek.	30 sek.
Obalené viry (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Herpes simplex, Ebola)	EN 14476	30 sek.	60 sek.
BVDV	EN 14476	30 sek.	30 sek.
Rota virus	EN 14476	30 sek.	60 sek.
Noro virus	EN 14476	30 sek.	30 sek.