

Dr. Mayer Roth

Roztok hotový k použití, pro čištění a dezinfekci rotačních nástrojů

Výrobek vytvořený pro čištění a současnou dezinfekci přesných rotačních nástrojů a dalších lékařských invazivních nástrojů.

Výrobek vytvořený pro čištění a současnou dezinfekci přesných rotačních nástrojů a dalších lékařských invazivních nástrojů.

Použití:

Dr. Mayer Roth: Výrobek vytvořený pro čištění a současnou dezinfekci přesných rotačních nástrojů a dalších lékařských invazivních nástrojů.

Doporučuje pro dezinfekci sond a ocelových fréz, fréz z tvrdokovu, diamantu, erozních a brusných nástrojů a také silikonových rotorů, keramických desek a nástrojů na extrakci nervů ve stomatologii. Obsahuje inhibitory koroze, které chrání nástroje vyrobené z oceli. Vykazuje velmi dobré vlastnosti rovněž v případě suchých organických zbytků. Přístroje lze dezinfikovat ponořením do ultrazvukových nádob nebo lázni.

Mikrobiologická účinnost*:

Bakterie (včetně MRSA), v souladu s EN 13277, EN 14561: 15 min. plíseň (*C. albicans*) v souladu s EN 13624, EN 14562: 15 min. mykobaktérie (*M. avium*, *M. Terrae*) v souladu s EN 14348, EN 14563: 15 min. adenovirus v souladu s EN 14476: 15 min. virus poliomyelitidy, v souladu s: EN 14476: 15 min. zapouzdřené viry (HBV, HIV, HCV, Vaccinia, BVDV) v souladu s: EN 14476: 15 min. (*zvýšená organická nálož).

Pokyny pro uživatele:

Inřed po použití vložte nástroje do nezředěného roztoku. Veškeré díly a otvory musí být kompletně naplněny a zality roztokem. Po dané době nástroje vyjměte, opláchněte je vodou a vysušte. V případě viditelné kontaminace vyčistěte nástroje kartáčem a znovu je vložte do roztoku. Nástroje jsou sterilizované poté, co byly vyčištěny, dezinfikovány a vysušeny. Výrobek se nesmí mísit s jinými čistícími nebo dezinfekčními prostředky. Výrobek je určen k profesionálnímu používání.

Složení:

100 g výrobku obsahuje: 0,15 g N-(3-aminopropyl)-N-dodecylpropan-1,3-diamin, 0,14g Poly-(oxy-1,2- etanodil), alfa.-[2-(didecylmethylamino)etilo]-.omega.-hydroxy-,propionát (sůl).

Bezpečné zacházení:

Škodlivý pro vodní organismy. Nevyhazujte do životního prostředí. V souladu s Nařízením 648/2004, obsahuje: < 5 % kationových tenzidů; obsahuje parfém. Aktivní složky na povrchu splňují požadavky na biologické rozložení dle Nařízení 648/2004.

Bezpečnostní list materiálu je dostupný na www.medisept.pl. Podrobné informace o poskytnutí první pomoci naleznete v bezpečnostním listu výrobku.

LOT



Výrobce: MEDISEPT Sp. z o.o. Konopnica 159 c
21-030 Motycz, Polsko, tel. +48 81 535 22 22
www.medisept.pl

Distributor: Dentstore S.R.L. ul. Tepes Vodă č. 89,
Bukurešť, Městská část 2, tel. 021 308 57 51
www.dentstore.ro



CE 2274

Datum vydání:
září 2021

RO rev.3



1L