

Obchodní název: Queen Dental Champion Bond

Použití:

Univerzální jednosložkové činidlo pro bonding na základě ethanolu tvrdnoucí na světle pro adhezi kompozitních náhrad tvrdnoucích na světle, které jsou určeny pro tvrdé zubní tkáň. Bonding kompozitních materiálů, kompomery pro přímé dentální restaurování. Bonding inlejšů, onlejšů, faset a korunek vyrobených z keramiky a kompozity pro nepřímé restaurování Určeno pro aplikace ve dvou krocích: Leptání a následně aplikace jednosložkového lepidla Champion bond. Napomáhá k maximální ochraně zubní tkáň, umožňuje izolovat dřeň od všech typů dráždivých látek a dosáhnout vysoké míry adheze dentálních materiálů ke tvrdým tkáním zubu.

Kontraindikace: Individuální intolerance jedné ze složek zdravotnického výrobku. Nepoužívejte pro jiné účely.

Může způsobit podráždění v důsledku přímého kontaktu se zubní dřeň. Oblast okolo dřene by proto měla být zakryta tenkou vrstvou hydroxidu vápenatého.

INTERAKCE S JINÝMI MATERIÁLY

Nepoužívejte společně s vrstvami, které obsahují eugenol, jelikož fenol narušuje polymeraci.

Složení:

Činidlo pro bonding „Champion Bond“ tvrdnoucí na světle:

HEMA, demethakrylátové pryskyřice, ethanol, voda, 10-MDP fosfát monomer, kopolymer, silan, iniciátory

Způsob podání

Vysušte povrch po naleptání zubní skloviny.

Pomocí standardních technik proved'te přípravu zubu. Pomocí koferdamu chraňte sousední zuby.

Poznámka: Pro ochranu dřene použijte hydroxid vápenatý.

Technika nanášení:

- Před použitím lahev promíchejte
- Naneste pár kapek materiálu na čistou míchací podložku
- Lahev pevně uzavřete víčkem
- Naneste materiál na danou sklovinu a povrch zubu pomocí špičky aplikátoru.
- Nechte materiál 5-10 sekund schnout.
- Během 5 sekund povrch opatrně vysušte

Poznámka:

1) Po dlouhém skladování materiálu v chladničce nechte před použitím lahev stát několik minut při pokojové teplotě.

2) Použití na neupravenou sklovinu by mělo předcházet ošetření 35-40% gelem kyseliny fosforečné, vypláchnutí vodou a pozvolné sušení.

UPOZORNĚNÍ: Varování

Udržujte mimo dosah dětí!

Pouze pro zubní použití!

Před použitím si oblečte vhodný ochranný oděv a rukavice.

Zabraňte kontaktu s očima. Při zasažení očí vypláchněte velkým množstvím vody.

Používejte ochranné rukavice.

Používejte opatrně u pacientů s mentálními poruchami.

Materiál nepoužívejte u těhotných žen (z důvodů nedostatku klinických dat).








Při alergických reakcích u zvláště citlivých pacientů by materiál měl být odstraněn a dále by se neměl používat.





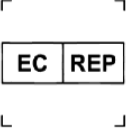



Obsah balení

1 x lahev 6 ml

1 x návod k použití

Příslušné symboly

	Výrobce
	Datum výroby
	Oprávněný zástupce v Evropském společenství
	Chraňte před vlhkostí
	Zabraňte expozici slunečnímu světlu
	Horní mez teplotního rozmezí
	Viz návod k použití

	<p>Nesterilní výrobek</p>
	<p>Pozor! Viz návod k použití</p>
	<p>Evropské označení shody s normami a identifikační číslo autorizovaného orgánu. Výrobek vyhovuje základním požadavkům směrnice (93/42/EHS) o zdravotnických prostředcích</p>
	<p>Číslo šarže</p>
	<p>Zdravotnický prostředek</p>
	<p>Je-li poškozen obal, výrobek nepoužívejte</p>
	<p>Skladovatelnost M-měsíce R-roky</p>
	<p>Euroasijské označení shody zdravotnických výrobků pro oběh na trhu Euroasijské ekonomické unie</p>

Přeprava

Všechny typy přepravujte při teplotě od 5 °C do 25 °C a relativní vlhkosti 10-95 %

Podmínky skladování

Skladujte při teplotě od 5 °C do 25 °C a relativní vlhkosti 10-95 %

Zabraňte expozici slunečnímu světlu.

Chraňte před vlhkostí.

Doba platnosti:

Skladovatelnost materiálu je 3 roky. Nepoužívejte po uplynutí data expirace.

Záruky výrobce

Výrobce zaručuje, že tento výrobek splňuje požadavky na všechny zveřejněné specifikace při dodržení podmínek pro skladování, přepravu a použití.

Využití

Využití podle pravidel MPI pro zdravotnický odpad třídy A, který není nebezpečný.

VÝROBCE ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

NANOPLANT HÖCHST GMBH

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Německo

Telefon: +49 36929 133948

E-mail: info@queen-dental.de

MÍSTO VÝROBY ZDRAVOTNICKÉHO PROSTŘEDKU

Neue Straße 67, 99846 Seebach, Německo

„Neo Strasse 67, 99846 Zeebakh, Německo“

**DISTRIBUTOR**

Best Brands Company, s.r.o.

Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava

Tel: +420 725 410 708